

小型高圧蒸気滅菌器 Medical Auto Clave

メディクレーブⅢ フルオート

よりよい安全性の向上と信頼性の高い滅菌を実現

MEDICLAVEⅢ FULL AUTO



特長

- 信頼性の高い滅菌を行うために、独自の飽和水蒸気置換機構を採用。
- マイコン制御により温度や経過時間をリアルタイムにデジタル表示。故障や異常もきめ細かく監視。
- W430×D530×H360mm、約 30kg のコンパクトな形状。
- 滅菌から乾燥・扉の自動開閉までを全て自動で行う。
(スタンダードタイプは乾燥時のドアの開閉を手動で行う)
- ドア開閉自動化の機能により、オートクレーブ内の温度と室温の差による再結露を防止。




高圧蒸気滅菌器専用クリーナー
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃しやすくし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。


飽和水蒸気置換機構

メディクレープⅢはチャンバー内を飽和水蒸気に置き換える独自の機構、飽和水蒸気置換機構により信頼性の高い滅菌能力を実現。

滅菌工程の流れ

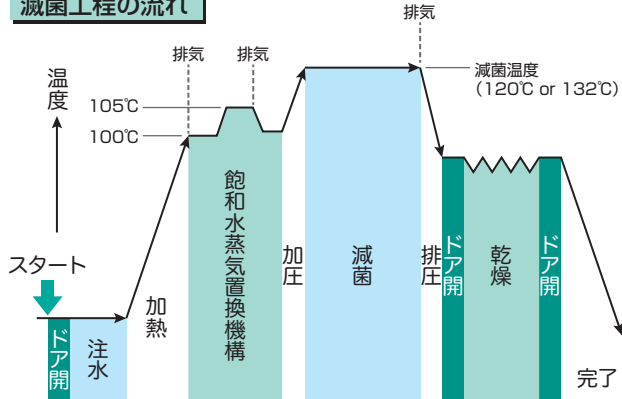

見やすく、設定も簡単なコンソールパネル

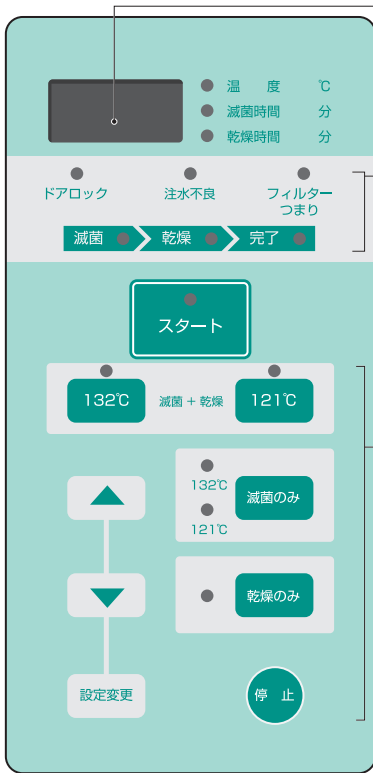

チャンバー内温度や経過時間をリアルタイムにデジタル表示します。

ドアロックなどのお知らせ表示や実行中の工程などを表示します。

わかりやすく押しやすいキー配列で、各種設定変更も簡単です。

再結露防止機能 <メディクレープⅢフルオートのみ>


フルオートタイプは、乾燥を開始するときドアが自動的に開き、乾燥が終わるとタイマー設定後にドアを自動的に閉じます。（スタンダードタイプは、手でドアを開閉する操作が必要です。）乾燥が終わり、すぐにドアを閉じると温度が下がるにつれて結露が起こり、せっかくの乾燥した被滅菌物を湿らせてしまいます。この結露を防止するため、乾燥終了後チャンバー内温度が室温近くまで下がるのを待って、ドアを自動で閉じます。



仕様

製品名	メディクレープⅢフルオート	メディクレープⅢ
電源および電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	1300VA	
漏電遮断機	15A 漏電感度電流:30mA	
外形寸法	W430 × D530 × H360mm	
チャンバー寸法	φ240 × D360mm(チャンバー入口: φ210mm)	
重量	約30kg(本体のみ)	
水タンク容量	約3.6リットル	
滅菌温度	132℃、121℃	
時間設定範囲	滅菌時間	132℃: 5~99分 121℃: 20~99分
	乾燥時間	1~99分
※管理者のみ変更可	乾燥後ドア閉時間	0~99分
		-
安全装置	安全弁	0.245MPa
	温度ヒューズ	190℃
付属品	トレイ: 2枚 ヒーターカバー: 1個 トレイハンガー: 1個 水受け皿: 1個 トレースタンド: 1個 専用クリーナー: 3袋	
医療機器認証番号	221AGBZX00062A06	221AGBZX00062A05

外形寸法図(単位:mm)

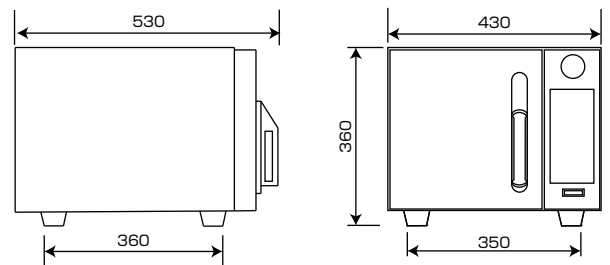

- 製品名 メディクレープⅢフルオート
一般名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器
- 製品名 メディクレープⅢ
一般名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器
- 本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2023年9月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。

©2023 by SK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

SK SKメディカル電子株式会社

ISO9001/ISO13485 認証工場

〒526-0817 滋賀県長浜市七条町305番地の1
TEL: 0749-63-7773 (代) FAX: 0749-63-4805

<http://www.sk-medical.jp/>

●お問い合わせ先